


Instrucciones para la toma de muestra para la realización de pruebas de detección de

Enfermedades de Transmisión Sexual Hombre

Contenido del Kit

- 1 recipiente estéril
- 1 Sobre de plástico con cierre hermético
- 1 Documento de instrucciones F02082
- 1 Documento de consentimiento informado F02080
- 1 Documento de solicitud de análisis
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Sobre de retorno del kit

Nº Análisis

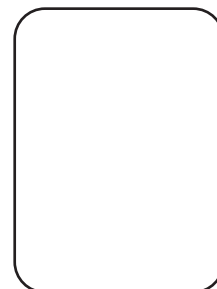

Instrucciones



1

Lea detenidamente, cumplimente y firme el documento de consentimiento informado.




2

Lávese las manos antes y después de orinar. Seque bien.



3

Quite la tapa del recipiente estéril (tapa roja). **No toque** el borde superior del frasco mientras lo maneja.

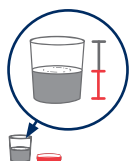

4

Recoja la primera orina de la mañana en el recipiente estéril.



5

Deposite el recipiente estéril lleno en el sobre de plástico facilitado y ciérrelo.



6

Introduzca la muestra en el kit junto a los documentos de solicitud de análisis y de consentimiento informado firmado. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



7

Para realizar la devolución del kit, deberá localizar el correo electrónico correspondiente a la entrega del paquete. En dicho correo encontrará un botón con la opción “**Solicitud de recogida**”. Al seleccionarlo, se abrirá un formulario que deberá cumplimentar para activar la devolución de la muestra. Una vez completado el proceso, la empresa de mensajería GLS acudirá a su domicilio para recoger el paquete.



8

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: laboratorioechevarne.com