

# Detección de Drogas

## Contenido del Kit

- 1 Tubo contenedor identificado para la recogida de muestra
- 1 Colector de saliva
- 1 Documento de instrucciones F01701
- 1 Documento de solicitud de análisis
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Sobre de retorno del kit


## Nº Análisis

## Instrucciones




1

No se debe comer, fumar, mascar ni beber nada al menos 30 minutos antes de la obtención de la muestra. Para facilitar la segregación de saliva, realice un pequeño masaje externo en los carrillos.

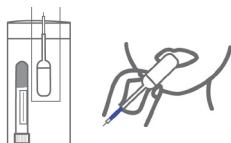

2

Abra el envoltorio, coloque el colector de saliva debajo de la lengua y cierre la boca hasta que vea que el indicador se vuelve de color azul (esto sucederá transcurridos unos minutos).

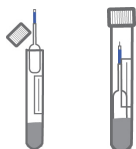

3

Abra el tubo contenedor en posición vertical e introduzca el colector de saliva con el indicador hacia arriba. Cierrelo ajustando el tapón a presión.



4

**Introduzca la muestra en el kit, junto al documento de solicitud de análisis.** Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



5

Para realizar la devolución del kit, deberá localizar el correo electrónico correspondiente a la entrega del paquete. En dicho correo encontrará un botón con la opción **“Solicitud de recogida”**. Al seleccionarlo, se abrirá un formulario que deberá cumplimentar para activar la devolución de la muestra. Una vez completado el proceso, la empresa de mensajería GLS acudirá a su domicilio para recoger el paquete.



6

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: [laboratorioechevarne.com](http://laboratorioechevarne.com)