


Test de Estrés

Contenidos del Kit

4 tubos etiquetados con almohadilla cilíndrica en el interior para la recogida de muestra.
Cada tubo va adaptado a otro de mayor tamaño y forma icónica.
1 Sobre de plástico con cierre hermético para introducir los tubos.
1 Documento de instrucciones F01684.
1 Documento de solicitud de análisis.
1 Precinto de seguridad.

Nº Análisis

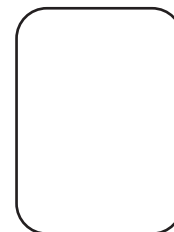

Horarios de toma de muestra

No tome ningún alimento o bebida en la hora previa a la toma de muestra. Tampoco se lave los dientes ni utilice ningún colutorio para enjuagarse la boca.

Tubo 1 → 8 h / Tubo 2 → 12 h / Tubo 3 → 16 h / Tubo 4 → 24 h

Instrucciones



1


Se ha de tomar la muestra de las 8 de la mañana antes de lavarse los dientes y desayunar. Para la toma del resto de muestras, ha de enjuagarse la boca con agua 15 minutos antes y a partir de este momento no haber ingerido nada (ni alimentos ni bebidas) hasta la toma de la muestra de saliva.



2

Destape el tubo correspondiente (1, 2, 3 o 4) según la hora, y, con las manos limpias y la punta de los dedos, retire la almohadilla cilíndrica. Introdúzcala en la boca, manténgala de 1 a 2 minutos por debajo de la lengua y los laterales.

Asegúrese que la almohadilla está totalmente empapada de saliva. En caso de no contar con el volumen suficiente de muestra, el Laboratorio no podrá analizarla.

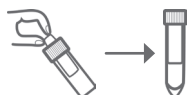


3

Vuelva a poner la almohadilla cilíndrica (empapada de saliva) en el tubo pequeño. Tápelos e introdúzcalo en el tubo grande, ajustándolo bien.



4

Conserve el tubo refrigerado después de cada recogida y al finalizar, introduzca las muestras en el sobre de plástico y éste en el kit, junto al documento de solicitud de análisis.

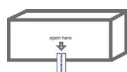

5

Coloque la muestra en el kit junto al documento de solicitud de análisis. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



6

Para realizar la devolución del kit, deberá localizar el correo electrónico correspondiente a la entrega del paquete. En dicho correo encontrará un botón con la opción "**Solicitud de recogida**". Al seleccionarlo, se abrirá un formulario que deberá cumplimentar para activar la devolución de la muestra. Una vez completado el proceso, la empresa de mensajería GLS acudirá a su domicilio para recoger el paquete.



7

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: laboratorioechevarne.com