



## Intolerancia Alimentaria

Nº Análisis

### Contenido del Kit

- 1 Lanceta automática
- 1 Papel absorbente
- 1 Documento de instrucciones F01807
- 1 Documento de solicitud de análisis
- 1 Precinto de seguridad
- 1 Sobre de retorno del kit




1

Lea detenidamente estas instrucciones.




2

Lávese las manos con agua y jabón y aclare abundantemente con agua. Desinfecte la yema del dedo anular con alcohol y deje secar la piel.

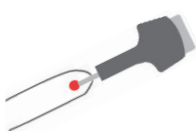

3

Gire el cabezal verde de la lanceta y retírelo. A continuación, tense la zona a pinchar y píñchela.

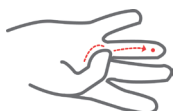

4

Realice un masaje en el dedo en dirección al lugar de punción para que se forme una gota grande de sangre.

*No apriete la zona que rodea el lugar de punción.*



5

Deposite 1 gota de sangre en cada círculo. Repita el proceso hasta rellenar los 5 círculos.



*Compruebe que la sangre ha llenado todo el círculo y que ha traspasado completamente la cara posterior del círculo.*



6

Deje secar completamente la sangre a temperatura ambiente (2 horas).



7

Coloque la muestra en el kit junto al documento de solicitud de análisis. Cierre el kit con el precinto de seguridad e introdúzcalo en el sobre facilitado para hacerlo llegar al Laboratorio.



8

Para realizar la devolución del kit, deberá localizar el correo electrónico correspondiente a la entrega del paquete. En dicho correo encontrará un botón con la opción **“Solicitud de recogida”**. Al seleccionarlo, se abrirá un formulario que deberá cumplimentar para activar la devolución de la muestra. Una vez completado el proceso, la empresa de mensajería GLS acudirá a su domicilio para recoger el paquete.



9

Le avisaremos por SMS cuando los resultados estén disponibles y usted podrá descargárselos en todo momento en: [laboratorioechevarne.com](http://laboratorioechevarne.com)